

RobinMedical

Den trykkfordelende luftmadrassen
med justeringsmulighet



DISTRIBUTØR:

Merivaara AS
Tvetenveien 30, 0666 Oslo, Norge
Tel. 22 88 04 60, Fax. 22 88 04 61
e-mail : merivaara@merivaara.no

PRODUSENT:

Bedtime as
Karoline Kristiansensvei 4, 0661 Oslo
Tel. 67111080, Fax. 67111081
e-mail: info@bedtime.no

Trykkfordeling

Kjernen i madrassen er et luftkammer med en unik konstruksjon, som gir optimal støtte og trykkfordeling.

Justeringsmuligheter

Madrassens luftkammer justeres ved hjelp av håndpanelet til pumpen mens bruker ligger på madrassen. Fra et mykt underlag, som avlaster og gir støtte, kan RobinMedical fort justeres opp til et fast underlag ved f.eks forflytning og stell. Hos pasienter med smerter og sårproblematikk kan det være særlig behov for å forandre fastheten i madrassen til stadighet.

Pumpen

Elektrisk pumpe med en trykkmåler som viser fastheten i madrassen på håndpanelet. Pumpen har også en egen knapp (csl) som automatisk stiller inn på det trykket som man er kommet fram til gir den optimale trykkavlastning for brukeren. På den måten er det lettere for pleiepersonell og bruker å stille tilbake madrassen etter bruk. Pumpen bruker kun strøm ved justering.

Trekk

Materialet er Polyester/ Polyurethane.

Det er elastisk, vanntett, flammehemmende, pustende og resistent mot bakterier og virus.

Farge: Himmelblå

Vask av trekk: 95c°. Kan tørketromles, renses og steriliseres med damp.

Resistent mot blod, urin, olje, fett og tåler desinfeksjonsmidler.

Trekket består av to deler slik at man enkelt kan ta av den øverste delen for å vaske.

Man slipper dermed å demontere madrassen ved vask.

Brukervekt

RobinMedical tåler brukere opp til 340 kg.

Størrelser

80/85/90 cm x 200 cm.

Pumpeoppheng

Pumpen kan henges på sengen.

Høyden på opphenget kan reguleres via å surre stroppene rundt sengen eller pumpen.

RobinMedical egner seg godt i sykehusseng

Målgruppe

RobinMedical er rettet mot brukere med mindre trykksår, eller fare for sår, forflytningsproblematikk og/ eller smerteproblematikk.

Madrassen letter stell og forflytning for både bruker og pleiepersonell.

Delkomponenter

RobinMedical kommer som delkomponenter slik at den lett kan flyttes eller pakkes bort. Dette er også en økonomisk gevinst ved at man kan erstatte deler i stedet for hele madrassen hvis noe skulle bli ødelagt.

